

## iVRT が正常動作しないが（動作するのもある）の対処方法

R\_TECH.INC 2018/09/20

iVRT の起動等に関して


**STEP1:**英語の Login でのみ動作しますので、現在の入っている LoginName が日本語の場合は変更してください

例：DD-System（OK） DD（OK） 放射線治療（日本語なので X）

**STEP2:**案内で示した [r-tech.japan-web.jp](http://r-tech.japan-web.jp) に入り、R-TECH 社が提供する 4 種のファイルをダウンロードしてください（DD 用の PC でなくても OK です、各施設で Internet が接続できる PC をお願いします）

**STEP3:**ダウンロードしたら、実行ファイル形式に PC で解凍します。


**STEP4:**同様に iVRT ホルダも解凍しておきます。

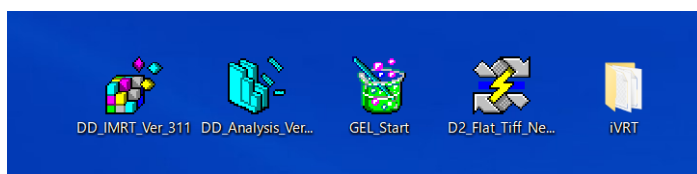

この様になります。

**STEP5:**DD-System の PC のデスクトップへコピーします（上図の如くになります）

**STEP6:**iVRT のホルダをクリックして、

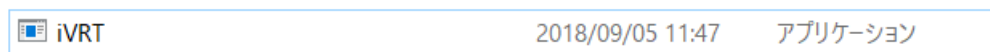


iVRT の本体をクリックすれば、本体が起動されます。  
各アイコンで動作するはずです。

**例：DD-IMRT 等が起動しない場合、**

**STEP1:**アイコンで起動するアプリもあるが起動しないアプリが有るけど???

**iVRT ホルダを開いて下さい。**

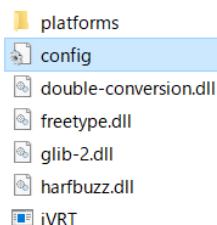

この config を'メモ等'で開いて下さい。


STEP2:Config の内容が開示されます。

```
[DD-IMRT]
```

```
program = "%desktop%\¥¥DD_IMRT_Ver_31.exe"
```

```
args = ""
```

上記の DD\_IMRT\_Ver\_31.exe を デスクトップにある DD-IMRT のファイル名は D\_IMRT\_Ver\_311.exe ですので



```
[DD-IMRT]
```

```
program = "%desktop%\¥¥DD_IMRT_Ver_311.exe"
```

```
args = ""
```

```
[DD-Analysis]
```

```
program = "%desktop%\¥¥DD_Analysis_Ver_14_64.exe"
```

```
args = ""
```

に変更して上書き保存してください。

これで再度 iVRT ホルダの iVRT 実行ファイルをクリックしてください。

正常動作すれば成功です。

ちなみに iVRT のショートカットをデスクトップへ作成しておけば容易に起動できます。